



# MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN AUSTAUSCH LITHIUM-IONEN AKKU BEIM HANDBEDIENTEIL BELLAVITA

## Austausch des Akku

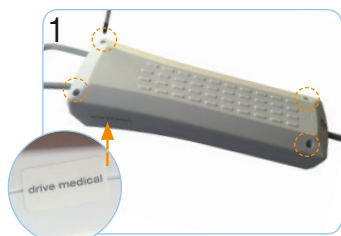


Öffnen Sie die vier Schrauben an der Unterseite der Handsteuerung und entfernen Sie das Drive Medical Siegel\*.


\*beim Entfernen der Versiegelung erlischt die Herstellergarantie.

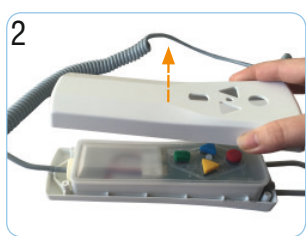


Nehmen Sie die obere Gehäusehälfte ab (Abb. 2) und entfernen Sie die Silikonastatur (Abb. 3). **ACHTUNG:** Diese Tastatur wird nicht wieder verwendet und kann im Hausmüll entsorgt werden.

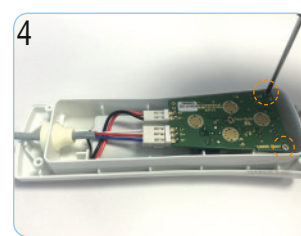

Öffnen Sie die zwei Befestigungsschrauben der Platine.

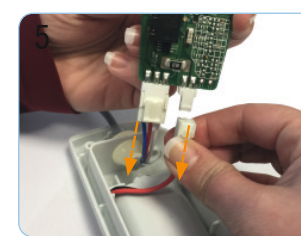


Entfernen Sie die beiden Stecker von der Platine. **WICHTIG:** Arretierung der Stecker entriegeln.

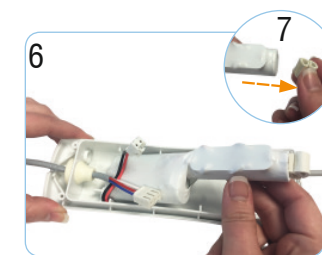


Entnehmen Sie den Akku (Abb. 6) und entfernen Sie das Polster an der Stirnseite (Abb. 7). Befestigen Sie das Polster am neuen Akku.

**HINWEIS:** Der Austausch des Akkus wird für Lifter ab dem Baujahr 2016 empfohlen.


## Einbau des neuen Akku

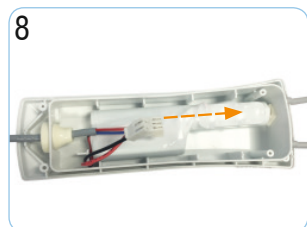

Legen Sie den Akku in das Gehäuse Unterteil.

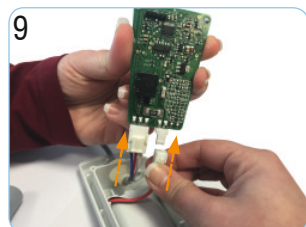


Schließen Sie die Stecker an der Platine wieder an.

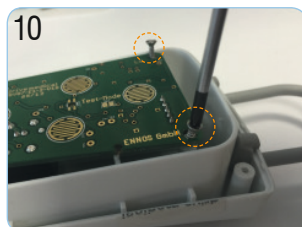


Befestigen Sie die Platine an dem Gehäuse.



Legen Sie die neue Silikonastatur auf das Gehäuse. **VORSICHT:** Auf guten Sitz der umlaufenden Nut achten.

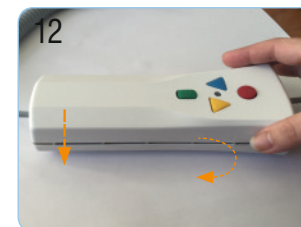

Legen Sie die obere Gehäusehälfte auf die Silikonastatur und schrauben Sie die zwei Gehäusehälften wieder zusammen (Abb. 12 - 13). **ACHTUNG:** Bei zu starkem Einschrauben der Schrauben kann das Gehäuse beschädigt werden. **Wir empfehlen ein Drehmoment von 0,6 Nm. Eventuell einen Drehmoment-Schraubendreher verwenden!**

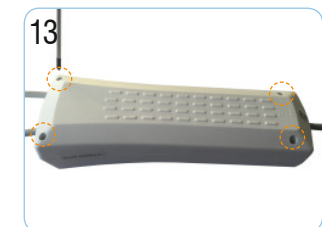

## Die Entsorgung des alten Akku

Bitte entsorgen Sie den alten Akku bei offiziellen Sammelstellen, gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG.