

Therapietisch

MONTAGEANLEITUNG FÜR MULTITEC ZUBEHÖR



REF 900600901

Montage



Lieferumfang:
2 x Führungsrohr für
Tischrahmen
2 x Rahmen für Tisch
1 x Tischplatte

Um die Führungsrohre zu befestigen müssen Sie die Armlehnen abnehmen. Führungsrohre zwischen Armlehnenpolster und Armlehnenhalter befestigen.

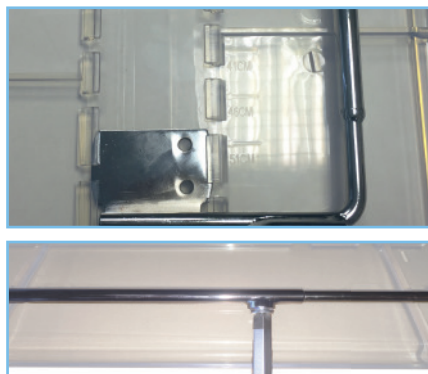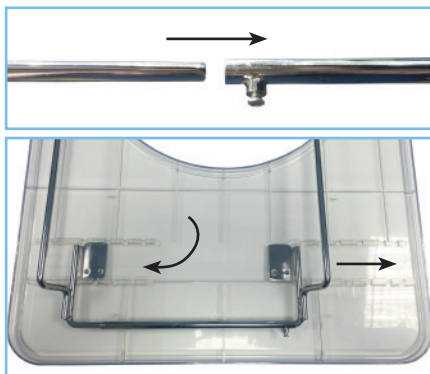

Stecken Sie beide Rahmenteile zusammen.

Um den Rahmen am Tisch befestigen zu können, legen Sie den Rahmen auf die Unterseite der Tischplatte. Bitte führen Sie die Rahmenteile von der Mitte aus in die dafür vorgesehenen Führungen.

Jetzt können Sie die gewünschte Breite einstellen und mit der Klemmschraube fixieren.

Nun können Sie den Tisch in die Führungsrohre an der Armlehnen einführen und in der gewünschten Position fixieren.