



55B22103
105.9.21

Kurzanleitung*

- Legen Sie die Matratze in das dafür vorgesehene Bett.
- Platzieren Sie das Aggregat mit den dafür vorgesehenen Haken am Fußende des Betts, auf den Boden oder auf eine ebene Fläche.
- Das Aggregat darf nicht abgedeckt werden => Überhitzungsgefahr!**
- Verbinden Sie mit dem Anschlusschlauch die Matratze und das Aggregat. Der Anschlusschlauch darf nicht geknickt und/oder verdreht sein und muss hörbar einrasten.
- Stecken Sie den Netzstecker in die dafür vorgesehene Steckdose.
- Schalten Sie das Aggregat ein, es leuchtet die LED „Niedriger Druck“.
- Stellen Sie das Gewicht** des Patienten am Gerät ein. Sobald die LED „Niedriger Druck“ erlischt, ist das System Betriebsbereit.
- Wenn Patient für kurze Zeit im Bett sitzt, erhöhen Sie den Druck in den Zellkammern durch drücken der Sitzfunktionstaste.

****die angegebenen Werte in der Gewichtskala sind Richtwerte und spiegeln nicht den vorhandenen Druck in den Luftkammern wieder. Näheres zur Gewichtseinstellung und Druckkontrolle entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung.**

Problemlösung (Kurzbeschreibung)*

- Aggregat funktioniert nicht =>Stecker richtig eingesteckt?
- LED am EIN/AUS Schalter leuchtet nicht => Steckdose unter Spannung?
- Alarm „Niedriger Druck/LowPressure“ => Ist der Anschlusschlauch richtig angeschlossen? Sind alle Zellen in der Matratze miteinander verbunden? Ist der CPR verschlossen?
- Matratze pumpt nicht auf => Anschlusschlauch abgeknickt / verdreht?
- Patient liegt durch => Druck in den Zellen zu niedrig?
- Es findet kein Wechseldruck statt => Luftzufuhrschläuche abgeknickt / verdreht? Statik / Static aktiv? Pflegefunktion / Autofirm aktiv?

***Die Kurzanleitung und die Problemlösung ersetzen nicht die vorhandene Gebrauchsanweisung**

Gefahr: Betreiben Sie das Aggregat nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Chemikalien => Explosionsgefahr!!!

Achtung: Das Gehäuse darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden => Gefahr von Stromschlag!!!