

Reinigungshinweise 800ml Sekretbehälter



1

Schalten Sie das Gerät aus, damit das Vakuum abgebaut wird.



2

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr.



3


Entfernen Sie den Schlauch und nehmen Sie den Sekretbehälter aus der Halterung.



4

Entfernen Sie vorsichtig den Deckel und leeren Sie den Behälter.

Der Sekretbehälter sollte nach jedem Gebrauch entleert werden.

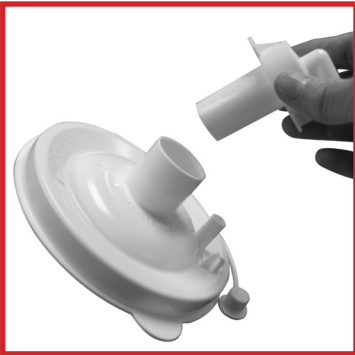

5

Entfernen Sie nun die Filterkartusche und den 11,43 cm-Schlauch und legen Sie beides beiseite.

Entfernen Sie die Schwimmerkugel nicht. Eine entfernte Schwimmerkugel kann ein Erstickenrisiko darstellen.



Die Filterkartusche darf keinesfalls nass werden!

Das Filtermaterial lässt sich nicht von der Hülle trennen.

Filterwechsel: alle zwei Monate oder bei Überfließen.



6

Legen Sie den Sekretbehälter und den Deckel in heißes Wasser ein; oder benutzen Sie einen Geschirrspüler. Spülen Sie anschließend mit warmem Wasser nach.



7

In einer Lösung aus einem Teil Essig und drei Teilen Wasser (warm) 60 Minuten lang einweichen. Spülen Sie ihn anschließend mit klarem warmem Wasser ab, und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.